

Tabela de Conversão AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism

GRAUS CILÍNDRICOS

GRAUS ESFÉRICOS

	-0,75		-1,00		-1,25		-1,50		-1,75		-2,00		-2,25		-2,50		-2,75		-3,00		
	Esf	Cil	Esf	Cil	Esf	Cil	Esf	Cil	Esf	Cil	Esf	Cil	Esf	Cil	Esf	Cil	Esf	Cil	Esf	Cil	
-11,50																					
-11,25	-10,00	sph	-10,00	-0,75	-10,00	-0,75	-10,00	-1,25	-10,00	-1,25	-10,00	-1,25	-10,00	-1,75	-10,00	-1,75	-10,00	-1,75	-10,00	-2,25	-11,50
-11,00	-10,00	sph	-9,50	-0,75	-9,50	-0,75	-9,50	-1,25	-9,50	-1,25	-9,50	-1,25	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-2,25	-11,00
-10,75	-10,00	sph	-9,50	-0,75	-9,50	-0,75	-9,50	-1,25	-9,50	-1,25	-9,50	-1,25	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-1,75	-9,50	-2,25	-10,75
-10,50	-9,50	sph	-9,00	-0,75	-9,00	-0,75	-9,00	-1,25	-9,00	-1,25	-9,00	-1,25	-9,00	-1,75	-9,00	-1,75	-9,00	-1,75	-9,00	-2,25	-10,50
-10,25	-9,50	sph	-9,00	-0,75	-9,00	-0,75	-9,00	-1,25	-9,00	-1,25	-9,00	-1,25	-9,00	-1,75	-9,00	-1,75	-9,00	-2,25	-9,00	-2,25	-10,25
-10,00	-9,00	sph	-9,00	-0,75	-9,00	-0,75	-9,00	-1,25	-9,00	-1,25	-9,00	-1,25	-9,00	-1,75	-9,00	-1,75	-9,00	-2,25	-9,00	-2,25	-10,00
-9,75	-9,00	sph	-8,50	-0,75	-8,50	-0,75	-8,50	-1,25	-8,50	-1,25	-8,50	-1,25	-8,50	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-2,25	-8,50	-2,25	-9,75
-9,50	-8,50	sph	-8,50	-0,75	-8,50	-0,75	-8,50	-1,25	-8,50	-1,25	-8,50	-1,25	-8,50	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-2,25	-8,50	-2,25	-9,50
-9,25	-8,50	sph	-8,50	-0,75	-8,50	-0,75	-8,50	-1,25	-8,50	-1,25	-8,50	-1,25	-8,50	-1,75	-8,50	-1,75	-8,50	-2,25	-8,50	-2,25	-9,25
-9,00	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-1,25	-8,00	-1,25	-8,00	-1,25	-8,00	-1,75	-8,00	-1,75	-8,00	-2,25	-8,00	-2,25	-9,00
-8,75	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-0,75	-8,00	-1,25	-8,00	-1,25	-8,00	-1,25	-8,00	-1,75	-8,00	-1,75	-8,00	-2,25	-8,00	-2,25	-8,75
-8,50	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-1,25	-7,50	-1,25	-7,50	-1,25	-7,50	-1,75	-7,50	-1,75	-7,50	-2,25	-7,50	-2,25	-8,50
-8,25	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-1,25	-7,50	-1,25	-7,50	-1,25	-7,50	-1,75	-7,50	-1,75	-7,50	-2,25	-7,50	-2,25	-8,25
-8,00	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-0,75	-7,50	-1,25	-7,50	-1,25	-7,50	-1,25	-7,50	-1,75	-7,50	-1,75	-7,50	-2,25	-7,50	-2,25	-8,00
-7,75	-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-1,25	-7,00	-1,25	-7,00	-1,25	-7,00	-1,75	-7,00	-1,75	-7,00	-2,25	-7,00	-2,25	-7,75
-7,50	-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-0,75	-7,00	-1,25	-7,00	-1,25	-7,00	-1,25	-7,00	-1,75	-7,00	-1,75	-7,00	-2,25	-7,00	-2,25	-7,50
-7,25	-7,00	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-1,25	-6,50	-1,25	-6,50	-1,25	-6,50	-1,75	-6,50	-1,75	-6,50	-2,25	-6,50	-2,25	-7,25
-7,00	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-0,75	-6,50	-1,25	-6,50	-1,25	-6,50	-1,25	-6,50	-1,75	-6,50	-1,75	-6,50	-2,25	-6,50	-2,25	-7,00
-6,75	-6,50	-0,75	-6,00	-0,75	-6,00	-0,75	-6,00	-1,25	-6,00	-1,25	-6,00	-1,25	-6,00	-1,75	-6,00	-1,75	-6,00	-2,25	-6,00	-2,25	-6,75
-6,50	-6,00	-0,75	-6,00	-0,75	-6,00	-0,75	-6,00	-1,25	-6,00	-1,25	-6,00	-1,25	-6,00	-1,75	-6,00	-1,75	-6,00	-2,25	-6,00	-2,25	-6,50
-6,25	-5,75	-0,75	-5,75	-0,75	-5,75	-0,75	-5,75	-1,25	-5,75	-1,25	-5,75	-1,25	-5,75	-1,75	-5,75	-1,75	-5,75	-2,25	-5,75	-2,25	-6,25
-6,00	-5,50	-0,75	-5,50	-0,75	-5,50	-0,75	-5,50	-1,25	-5,50	-1,25	-5,50	-1,25	-5,50	-1,75	-5,50	-1,75	-5,50	-2,25	-5,50	-2,25	-6,00
-5,75	-5,50	-0,75	-5,50	-0,75	-5,50	-0,75	-5,50	-1,25	-5,50	-1,25	-5,50	-1,25	-5,50	-1,75	-5,50	-1,75	-5,50	-2,25	-5,50	-2,25	-5,75
-5,50	-5,25	-0,75	-5,25	-0,75	-5,25	-0,75	-5,25	-1,25	-5,25	-1,25	-5,25	-1,25	-5,25	-1,75	-5,25	-1,75	-5,25	-2,25	-5,00	-2,25	-5,50
-5,25	-5,00	-0,75	-5,00	-0,75	-5,00	-0,75	-5,00	-1,25	-5,00	-1,25	-5,00	-1,25	-5,00	-1,75	-5,00	-1,75	-5,00	-2,25	-5,00	-2,25	-5,25
-5,00	-4,75	-0,75	-4,75	-0,75	-4,75	-0,75	-4,75	-1,25	-4,75	-1,25	-4,75	-1,25	-4,75	-1,75	-5,00	-1,75	-4,75	-2,25	-4,75	-2,25	-5,00
-4,75	-4,50	-0,75	-4,50	-0,75	-4,50	-0,75	-4,50	-1,25	-4,50	-1,25	-4,50	-1,25	-4,50	-1,75	-4,75	-1,75	-4,50	-2,25	-4,50	-2,25	-4,75
-4,50	-4,25	-0,75	-4,25	-0,75	-4,50	-0,75	-4,25	-1,25	-4,25	-1,25	-4,25	-1,25	-4,25	-1,75	-4,25	-2,25	-4,25	-2,25	-4,25	-2,25	-4,50
-4,25	-4,00	-0,75	-4,00	-0,75	-4,25	-0,75	-4,00	-1,25	-4,00	-1,25	-4,00	-1,25	-4,00	-1,75	-4,00	-2,25	-4,00	-2,25	-4,25	-2,25	-4,25
-4,00	-4,00	-0,75	-4,00	-0,75	-4,00	-0,75	-4,00	-1,25	-4,00	-1,25	-4,00	-1,25	-4,00	-1,75	-4,00	-2,25	-4,00	-2,25	-4,00	-2,25	-4,00
-3,75	-3,75	-0,75	-3,75	-0,75	-3,75	-0,75	-3,75	-1,25	-3,75	-1,25	-3,75	-1,25	-3,75	-1,75	-3,75	-2,25	-3,75	-2,25	-4,00	-2,25	-3,75
-3,50	-3,50	-0,75	-3,50	-0,75	-3,50	-0,75	-3,50	-1,25	-3,50	-1,25	-3,50	-1,25	-3,50	-1,75	-3,50	-2,25	-3,50	-2,25	-3,75	-2,25	-3,50
-3,25	-3,25	-0,75	-3,25	-0,75	-3,25	-0,75	-3,25	-1,25	-3,25	-1,25	-3,25	-1,25	-3,25	-1,75	-3,25	-2,25	-3,25	-2,25	-3,50	-2,25	-3,25
-3,00	-3,00	-0,75	-3,00	-0,75	-3,00	-0,75	-3,00	-1,25	-3,00	-1,25	-3,00	-1,25	-3,00	-1,75	-3,00	-2,25	-3,00	-2,25	-3,25	-2,25	-3,00
-2,75	-2,75	-0,75	-2,75	-0,75	-2,75	-1,25	-2,75	-1,25	-2,75	-1,25	-2,75	-1,25	-2,75	-1,75	-2,75	-2,25	-2,75	-2,25	-3,00	-2,25	-2,75
-2,50	-2,50	-0,75	-2,50	-0,75	-2,50	-1,25	-2,50	-1,25	-2,50	-1,25	-2,50	-1,25	-2,50	-1,75	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,75	-2,25	-2,50
-2,25	-2,25	-0,75	-2,25	-0,75	-2,25	-1,25	-2,25	-1,25	-2,25	-1,25	-2,25	-1,25	-2,25	-1,75	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,50	-2,25	-2,25
-2,00	-2,00	-0,75	-2,00	-0,75	-2,00	-1,25	-2,00	-1,25	-2,00	-1,25	-2,00	-1,25	-2,00	-1,75	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,25	-2,25	-2,00
-1,75	-1,75	-0,75	-1,75	-0,75	-1,75	-1,25	-1,75	-1,25	-1,75	-1,25	-1,75	-1,25	-1,75	-2,25	-1,75	-2,25	-1,75	-2,25	-2,00	-2,25	-1,75
-1,50	-1,50	-0,75	-1,50	-0,75	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-2,25	-1,50	-2,25	-1,50	-2,25	-1,75	-2,25	-1,50
-1,25	-1,25	-0,75	-1,25	-0,75	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-2,25	-1,25	-2,25	-1,50	-2,25	-1,50	-2,25	-1,25
-1,00	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-2,25	-1,00	-2,25	-1,25	-2,25	-1,25	-2,25	-1,00
-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-1,25	-0,75	-1,25	-0,75	-1,25	-0,75	-1,25	-0,75	-2,25	-0,75	-2,25	-1,00	-2,25	-1,00	-2,25	-0,75
-0,50	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-1,25	-0,50	-1,25	-0,50	-1,25	-0,50	-1,25	-0,50	-2,25	-0,50	-2,25	-0,75	-2,25	-0,75	-2,25	-0,50
-0,25	-0,25	-0,75	-0,25	-0,75	-0,25	-1,25	-0,25	-1,25	-0,25	-1,25	-0,25	-1,25	-0,25	-2,25	-0,25	-2,25	-0,50	-2,25	-0,50	-2,25	-0,25
0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,75	0,00	-1,25	0,00	-1,25	0,00	-1,25	0,00	-1,25	0,00	-2,25	0,00	-2,25	-0,25	-2,25	-0,25	-2,25	0,00
+0,25	+0,25	-0,75	+0,25	-0,75	+0,25	-1,25	+0,25	-1,25	+0,25	-1,25	+0,25	-1,25	+0,25	-2,25	+0,25	-2,25	0,00	-2,25	0,00	-2,25	+0,25
+0,50	+0,50	-0,75	+0,50	-0,75	+0,50	-1,25	+0,50	-1,25	+0,50	-1,25	+0,50	-1,25	+0,50	-2,25	+0,50	-2,25	+0,25	-2,25	+0,25	-2,25	+0,50
+0,75	+0,75	-0,75	+0,75	-0,75	+0,75	-1,25	+0,75	-1,25	+0,75	-1,25	+0,75	-1,25	+0,75	-2,25	+0,75	-2,25	+0,50	-2,25	+0,50	-2,25	+0,75
+1,00	+1,00	-0,75	+1,00	-0,75	+1,00	-1,25	+1,00	-1,25	+1,00	-1,25	+1,00	-1,25	+1,00	-2,25	+1,00	-2,25	+0,75	-2,25	+0,75	-2,25	+1,00
+1,25	+1,25	-0,75	+1,25	-0,75	+1,25	-1,25	+1,25	-1,25	+1,25	-1,25	+1,25	-1,25	+1,25	-2,25	+1,25	-2,25	+1,00	-2,25	+1,00	-2,25	+1,25
+1,50	+1,50	-0,75	+1,50	-0,75	+1,50	-1,25	+1,50	-1,25	+1,50	-1,25	+1,50	-1,25	+1,50	-2,25	+1,50	-2,25	+1,25	-2,25	+1,25	-2,25	+1,50
+1,75	+1,75	-0,75	+1,75	-0,75	+1,75	-1,25	+1,75	-1,25	+1,75	-1,25	+1,75	-1,25	+1,75	-2,25	+1,75	-2,25	+1,50	-2,25	+1,50	-2,25	+1,75
+2,00	+2,00	-0,75	+2,00	-0,75	+2,00	-1,25	+2,00	-1,25	+2,00	-1,25	+2,00	-1,25	+2,00	-2,25	+2,00	-2,25	+1,75	-2,25	+1,75	-2,25	+2,00
+2,25	+2,25	-0,75	+2,25	-0,75	+2,25	-1,25	+2,25	-1,25	+2,25	-1,25	+2,25	-1,25	+2,25	-2,25	+2,25	-2,25	+2,00	-2,25	+2,00	-2,25	+2,25
+2,50	+2,50	-0,75	+2,50	-0,75	+2,50	-1,25	+2,50	-1,25	+2,50	-1,25	+2,50	-1,25	+2,50	-2,25	+2,50	-2,25	+2,25	-2,25	+2,25	-2,25	+2,50
+2,75	+2,75	-0,75	+2,75	-0,75	+2,75	-1,25	+2,75	-1,25	+2,75	-1,25	+2,75	-1,25	+2,75	-2,25	+2,75	-2,25	+2,50	-2,25	+2,50	-2,25	+2,75
+3,00	+3,00	-0,75	+3,00	-																	

Como adaptar AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism



1. Após o exame de refração, utilize a Tabela de Conversão para selecionar as lentes adequadas.
2. Durante a avaliação, é necessário observar se a lente está bem centralizada no olho, cobrindo toda a córnea. Ela deve mover-se naturalmente, permitindo a troca do filme lacrimal a cada piscada. Para finalizar, faça o teste *push-up*: toque levemente na lente, provocando uma movimentação vertical ou horizontal, e veja se ela volta naturalmente para a posição centralizada.
3. AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism estabiliza-se nos olhos em apenas 30 segundos. Verifique se a lente está posicionada corretamente por meio das marcas 3, 6 e 9 horas. Se a rotação não estiver correta, ela deverá ser compensada conforme o esquema a seguir.

Se girar no sentido horário, somar o quanto a lente girou ao eixo da refração.

Se girar no sentido anti-horário, subtrair o quanto a lente girou ao eixo da refração.



A rotação máxima a ser compensada é 20°.




4. Avalie a acuidade visual.

Parâmetros AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism:

Dioptrias Esféricas (DE)	Graus Cilíndricos (D)	Eixos
0,00 a -6,00 (em passos de 0,25D)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25	10° a 180° (em passos de 10°)
-6,50 a -10,00 (em passos de 0,50D)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170° e 180°
0,00 a +6,00 (em passos de 0,25D)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170° e 180°
Material: Lotrafilcon B		
Desenho: superfície anterior esférica/superfície posterior tórica		
Conteúdo aquoso: 33%		
Tinta de manuseio: azul		
Diâmetro: 14,5 mm		
Curva Base: 8,7 mm		
Espessura Central: 0,102 mm @ -3,00 D		
Transmissibilidade (Dk/t): 138 @ -3,00DE, -1,25DC x 180		
Superfície: tratamento de superfície Smartshield™ ▲		
Estabilização: Precision Balance 8 4™		
Linhas de marcação: linhas de marcação em posições de 3, 6 e 9 horas		
Substituição: mensal (uso diário) ou semanal (uso estendido)		
Regime de Uso: diário ou estendido (6 noites e descansa uma)		

É POR ISSO
que você pode oferecer aos seus
pacientes o conforto prolongado
o dia todo, todos os dias.²⁻³

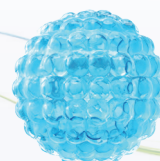

**ESTA É
HydraGlyde®**
Matriz Umidificante.



Para informações sobre
soluções Opti-Free®:



Para informações sobre
lentes de contato:



▲Tecnologia Smartshield™ - não houve alteração na composição da lente. O tratamento de superfície de plasma existente na família Air Optix® agora tem um novo nome inteligente.

Referências: 1. br.alcon.com 2. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today's CLs. Optician 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296, 42-46.

3. Davis J, Ketelson HA, Shows A, Meadows DL. A lens care solution designed for wetting silicone hydrogel materials. ARVO Meeting Abstracts April 11, 2010 51:3417.

Registros ANVISA: AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for ASTIGMATISM n° 80153480198 e OPTI-FREE® PUREMOIST® n° 80153480094. © 2019 Alcon AP3: BR-AHA-1900002 - Outubro/2019. *Marca de Novartis

Alcon
SEE BRILLIANTLY

Líder mundial em cuidados com a visão*