


Paragon CRT®

GUIA DE ADAPTAÇÃO RÁPIDO




Nota: Sempre que avaliar a lente deve afastar as pálpebras para não influenciar o comportamento da mesma

ADAPTAÇÃO IDEAL DE CRT

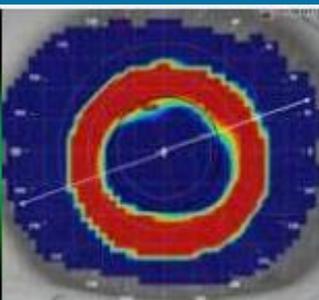


- Centrada (bull's eye)
- 3-4 mm zona de tratamento (anel de tratamento completo)
- Média periferia alinhada
- 1mm de levantamento de bordo

DESCENTRAGEM SUPERIOR/LATERAL

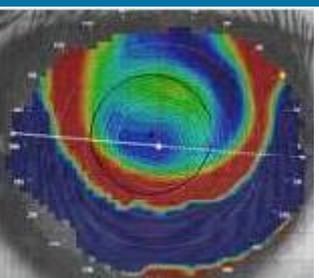

- Aumentar RZD em passos de 25µm
- Poderá ter de fechar LZA em 1 grau
- Aumentar diâmetro em passos de 0,5 mm

DESCENTRAGEM INFERIOR

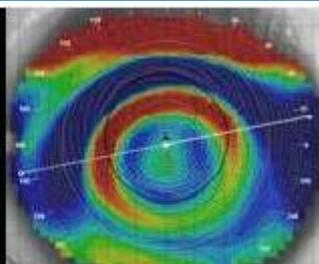

- Abrir LZA em 1 grau
- Diminuir RZD em 25µm

LEVANTAMENTO DE BORDO



Bordo apertado/fechado

Diminuir LZA em 1 grau

(ex: 33° para 32°)



Bordo excessivo/levantado

Aumentar LZA em 1 grau

(ex: 31° para 32°)

