



1. Faça a ceratometria.
2. Escolha a curva base da lente de teste baseado na seguinte sugestão:
 - a. Córnea esférica: adaptar em K ou 0,25 mais plano do que K.
 - b. Córnea cilíndrica entre 0,25 e 1,00 dioptria: adaptar em K ou 0,25 mais apertada do que K.
 - c. Córnea cilíndrica entre 1,25 e 3,00 dioptrias: adaptar 0,25 ou 0,50 mais apertada do que K.
 - d. Córnea com cilindro maior que 3,00 dioptrias: adaptar 0,50 mais apertada do que K.
3. Faça o teste de fluoresceína e analise a relação lente córnea. Ajuste ou aplane, se necessário.
4. Faça a sobrerefração.

OBSERVAÇÕES

Lembre-se que a lente **MEDICON HR**[®] só é fabricada em curvaturas que variam em faixas de 0,50 dioptrias.

Quando a curvatura da lente ideal for determinada em 0,25 ou 0,75 dioptrias use no teste sempre a lente 0,25 mais plana.

Por serem lentes de diâmetros grandes e de alta transmissibilidade ao oxigênio, a tendência é sempre fazer adaptações mais planas.